

Gebruikstips schilhandje®

De ultieme oplossing voor mensen met reuma, artrose, neuropathie, beperkte handfunctie, functioneel éénhandige mensen en natuurlijk ook mensen met gezonde handen. Want...hij is 'weerhandig'!



Weerhandig.nl
spreker blogger ervaringsdeskundige verkoper

Weerhandig haalt de beperking uit je beperking. Gedegen ervaringsadvies en hulpmiddelen waar je trots op kan zijn. Zoek je iets? Vraag het ons!

Alle handigheidjes op één plek!

mail ons!

info@weerhandig.nl

Siemon Vroom, rechtszijdig verlamd, adviseert cliënten en behandelaars.

- Je kan het beste hem natmaken en op de bodem of de zijwand van de wasbak plaatsen. Eventueel kan je hem ook op een glad oppervlak plaatsen, bijvoorbeeld de eettafel. Zie maar wat je het gemakkelijkste vindt;
- Voordat je hem plaatst even het stukje schoonmaken waar je de zuignapjes zet;
- Prik nu wat je wilt schillen, bijvoorbeeld een aardappel, op de prikkers. De prikkers zijn bewust niet allemaal dezelfde lengte om het prikken soepeler te laten verlopen;
- Pak de speciaal met Solingenmesjes (=kwaliteit) uitgeruste Y-schiller en schil de aardappel helemaal aan tot zover je kan komen met het de dunschiller. Door de aardappel te draaien met de hendel bent u binnen een paar seconden klaar;
- Haal hem er af en prik hem er omgekeerd op en herhaal het proces even aan de bovenzijde en hij is geschild;
- Je kan hem zelfs doormidden snijden met een gewoon mesje;
- Vervang eventueel aardappels, voor appels, peren, uien en wat je maar wil schillen. Zelfs komkommers en winterpenen zijn niet veilig voor het schilhandje®! Wel even dan met de lange zijde op het schilhandje® neerleggen.
- Gebruik voor kiwi's het kartelmesje (indien gekocht).

Het ergonomische en schokdempende antislip-handvat is verdikt om een betere grip te krijgen. En als je hem in de wasbak legt zijn de schillen zo weer opgeruimd. **Belangrijk:** haal het schilhandje® los met de lipjes van de speciale zuignappen om het vacuüm te verbreken. Simpel afspoelen en laten drogen. **NIET in de vaatwasser**

- Materiaal set: kunststof HDPE en roestvrij inox staal;
- Zie verder video op weerhandig.nl/schilhandje voor de tips van het schilhandje®.

Meer informatie: info@weerhandig.nl